

Alle Rechte vorbehalten:


revolution sports

www.revolutionsports.eu



Rollstuhl-Naben Installation

WERKZEUG: 10mm Innensechskant-Schlüssel (siehe Abbildung)

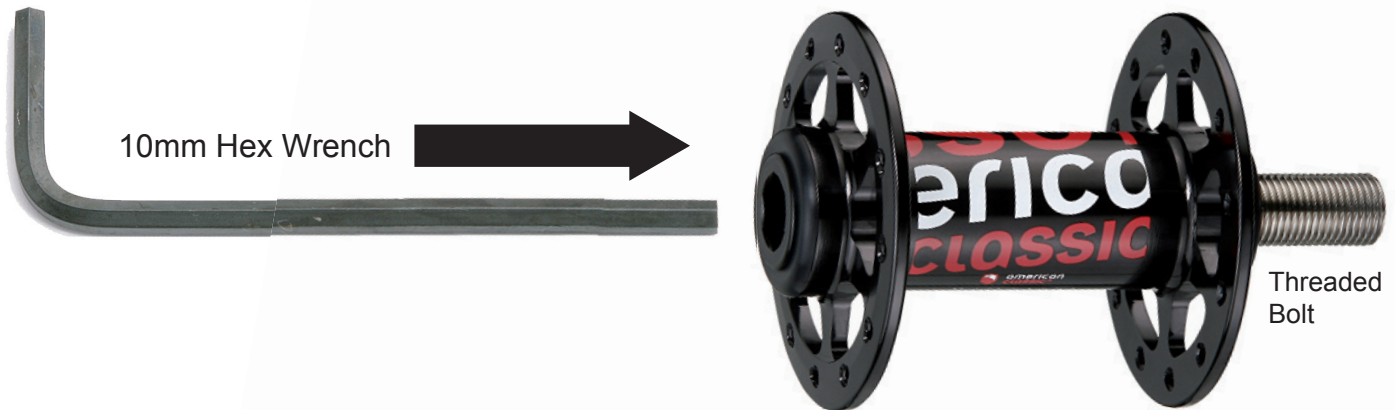

INSTALLATION

Benutzen Sie den langen 10mm Innensechskant-Schlüssel um die American Classic Hinterräder an- oder abzuschrauben. Stecken Sie den 10mm Innensechskant-Schlüssel 60mm weit in das Loch am Ende der Nabe um den versenkten 10mm Kopf des Bolzens zu erreichen. Gehen Sie sicher das die Räder sicher festgeschraubt sind bevor Sie fahren.

HINWEIS: Nicht den 12mm Innensechskant-Einsatz am äusseren Ende der Nabe anfassen. Dieser hält die Lager und Staubkappen da wo sie hingehören und wird nicht zum an- und abschrauben gebraucht. Immer sicher gehen dass der 12mm Innensechskant-Einsatz sicher verschraubt ist.

TRANSPORT/VERSAND

Der Gewindebolzen lässt sich für den Transport oder Versand einziehen.

GEWINDEBOLZEN EINZIEHEN:

Klopfen Sie leicht auf das Ende des Bolzens bis er sich in die Nabe schieben lässt. Nicht hämmern.

GEWINDEBOLZEN FÜR DIE MONTAGE AUSFAHREN:

Stecken Sie den 10mm Innensechskant in die Nabe und drücken/klopfen Sie den Bolzen heraus. Nicht hämmern.

Der korrekte Zusammenbau ist sehr entscheidend für die Betriebssicherheit.
Sämtliche Reparaturen sollten ausschließlich von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden.
sales@amclassic.com • www.amclassic.com